

# GELPRO



**Capuchon avec dosage standardisé**

**Phase solide protégée contre l'humidité**

**Phase liquide séparée**

**EXCLUSIVEMENT RESERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ**

## INDICATION PRINCIPALE

DENTALBIOME GELPRO est utilisé en support des traitements pour les caries et la maladie parodontale. Il est également indiqué pour la prévention des caries et de la maladie parodontale.

## MODE D'ACTION PRINCIPAL


Les *Lactobacilli paracasei* GMNL-33 inactivées par la chaleur forment un revêtement qui recouvre la surface des dents et des gencives, constituant ainsi une barrière protectrice contre les bactéries orales pathogènes.

## DESCRIPTION PRODUIT




Base gel avec un léger goût de menthe


## MODE D'EMPLOI

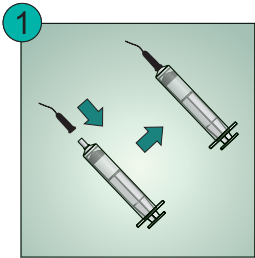


Prendre une seringue de 3 ml et l'assembler au préalable avec l'embout approprié \*

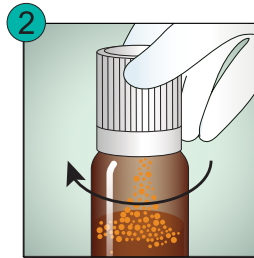


Visser le bouchon de manière à ce que la poudre tombe dans la phase liquide

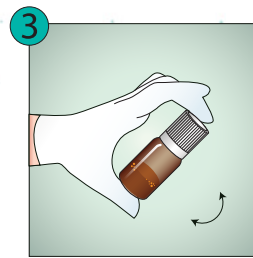


Agiter vigoureusement pendant 5 secondes

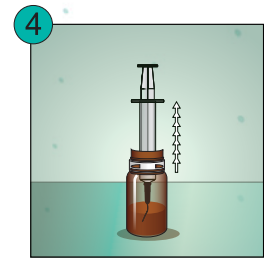

Aspirer le mélange obtenu avec la seringue munie de l'embout

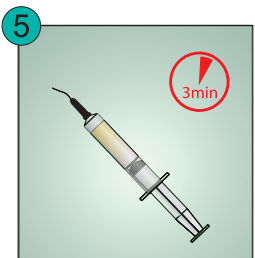

Attendre au moins 3 min

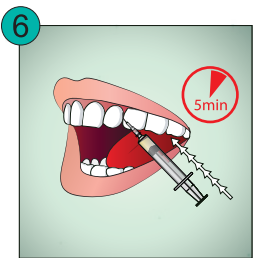

Appliquer le gel dans la poche gingivale et laisser agir au moins 5 minutes

## COMPOSITION

**Phase solide:** *Lactobacilli paracasei* GMNL-33 inactivés par la chaleur (10 milliards de cellules par flacon), gomme de guar, maltodextrine, stéarate de magnésium.

**Phase liquide:** Eau purifiée, citrate de sodium, arôme naturel de menthe, acide citrique, sorbate de potassium, benzoate de sodium.

## PRÉSENTATION

Boîte carton contenant 5 flacons. Chaque flacon est composé d'une phase solide et d'une phase liquide, ces 2 phases étant distinctes.

## CLASSIFICATION

Dispositif médical



\* Veuillez noter que la seringue de 3 ml et l'embout ne sont pas inclus. Vous devrez les acheter séparément. Nous vous recommandons d'utiliser les seringues BD Plastipak 3 ml Luer Lok (REF 309658) et les embouts Miraject Endo Luer 23 Gauge (REF 254215), ou tout système équivalent.

